



Bedienungsanleitung Trimmer

Erstellung der Bedienungsanleitung: 03/2009

Dieses Gerät wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und findet gemäß Bedienungsanleitung Einsatz. Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung oder nicht sachgemäßem Gebrauch ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender verpflichtet, das Gerät eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf Eignung und Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, zumal wenn diese Zwecke nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind. Dies gilt auch, wenn das Gerät in Kombination mit Produkten von Mitbewerbern angewendet wird.

Printed in Wendelstein

© Wegold Edelmetalle GmbH, Alte Salzstraße 9, 90530 Wendelstein / Germany

Telefon 09129 / 4030-0, Telefax 09129 / 4030-40

info@wegold.de, www.wegold.de

QMF 4.5-802 DE Rev. d vom 07.06.2011

- Montieren Sie die neue Schleifscheibe vorsichtig, so dass der Dichtring der Kupplung nicht verletzt wird. Nach erfolgter Montage prüfen Sie die Schleifscheibe mit der Hand auf freien Lauf.
- Danach setzen Sie die Gehäuseabdeckung wieder an das Trimmergehäuse und ziehen die 4 Befestigungsschrauben fest.
- Schließen Sie das Gerät an die Stromnetz- und Wasserversorgung an.
- Bitte prüfen Sie durch einen Testlauf, ob ungewöhnliche Schwingungen auftreten.

5 Sonstige Hinweise

5.1 Wartung und Reinigung

- Reinigen Sie nach Gebrauch das Gerät von Staub- und Gipsresten.
- Zur allgemeinen Reinigung empfehlen wir lauwarmes Seifenwasser. Bitte verwenden Sie keine aggressiven Scheuermittel oder Alkohol.
- Gerät niemals in irgendwelche Flüssigkeiten tauchen.
- Sollten Sie eine Verringerung der Schleifleistung feststellen, wechseln Sie bitte die Schleifscheibe.

5.2 Kundendienst

Ihr Gerät wurde sorgfältig gefertigt und vor der Auslieferung gewissenhaft geprüft. Sollten im Laufe der Zeit Fehlfunktionen auftreten oder Reparaturen nötig sein, verständigen Sie bitte Ihren Wegold-Kundendienst unter der Telefonnummer: 09129 / 40 30—0.

5.3 Gewährleistung

Die Gewährleistung für Ihr Gerät beträgt 1 Jahr.

5.4 Haftung


Wir übernehmen keinerlei Haftung für evtl. Druckfehler in vorliegender Bedienungsanleitung. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die dem technischen Fortschritt dienen.

3.2 Lieferumfang

- 1 x Nasstrimmer (mit Korund- oder Diamantscheibe)
- 1 x Netzkabel
- 1 x Wasseranschlussschlauch
- 1 x Ablaufschlauch
- 1 x Werkzeug zum Wechsel der Scheibe

Kontrollieren Sie bitte unbedingt den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

3.3 Geräteansicht und Bezeichnungen

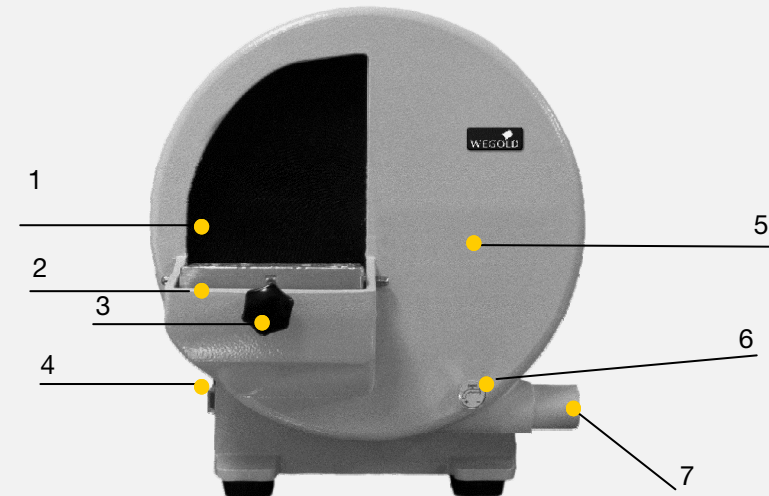

Bedienelemente:

- 1 Schleifscheibe
- 2 Trimmertisch
- 3 Verstellerschraube
- 4 Hauptschalter
- 5 Trimmergehäuse
- 6 Wassermengenventil

3.4 Technische Daten

Breite	310 mm
Tiefe	450 mm
Höhe	345 mm
Gewicht	21 kg
Netzspannung	230 V; 50/60 Hz
Drehzahl	3.000 U/min
Leistung	1.200 W

3.5 Inbetriebnahme

Lagerhinweise:

Die Lagertemperatur des Gerätes ist von -10° C bis +40° C festgelegt. Das Gerät darf nicht gestürzt werden.

*Lagertemperatur
beachten*

Netzanschluss:

Prüfen Sie bitte vor Anschluss des Gerätes, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Ihres Netzanschlusses übereinstimmt.

Das Gerät muss mit dem Netzkabel an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.

3.6 Aufstellung und Montage des Gerätes

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, feste Fläche. In der Nähe des Aufstellortes muss sich ein Wasseranschluss und ein Abwasseranschluss (Gipsabscheider) befinden.
- Schließen Sie das gekrümmte Ende des Wasser-schlauches an das rückseitig am Gerät befindliche Anschlussstück an. Das andere Ende schrauben Sie an den Wasseranschluss.
- Stecken Sie den Abwasserschlauch auf die vorne rechts befindliche Wasserablauföffnung (7). Das andere Ende stecken Sie an den Abwasseranschluss (Gipsabscheider). Geben Sie dem Abwasserschlauch ein leichtes Gefälle, damit es am Wasserauslass zu keinerlei Stauungen kommt.
- Schließen Sie das Gerät an einen geerdeten Stromanschluss mit 230 V, 50/60 Hz an.

- Öffnen Sie nun den Wasserhahn und schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter (4) ein. Die Schleifscheibe (1) beginnt zu laufen und das Elektroventil der Wasserversorgung öffnet sich.
- Am Ventil zur Regelung der Wassermenge (6) stellen Sie nun die gewünschte Wassermenge zur Spülung der Schleifscheibe ein.
- Prüfen Sie nach ein paar Betriebsminuten die Anschlüsse auf evtl. Undichtigkeiten.

4 Bedienung

- Trimmertisch durch Lockern der Verstell-schraube (3) auf gewünschten Winkel (80°, 90°, 100°) einstellen. Danach Verstell-schraube wieder festziehen.
- Wir empfehlen zum eigenen Schutz eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe zu verwenden.
- Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter (4) ein.
- Öffnen Sie den Wasserhahn des Wasserhauptanschlusses und regeln Sie die gewünschte Wassermenge mit dem Ventil (6).
- Das Gerät ist bereit zum Trimmen.
- Nach Arbeitsende schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter (4) aus und schließen Sie die Wasserzufuhr am Haupthahn der Wasserleitung.
- Wir empfehlen nach Gebrauch des Trimmers den Trimmertisch (2) mit einem feuchten Tuch zu reinigen.

Wechseln der Schleifscheibe:

- Gerät vom Stromnetz trennen und Hauptwasserhahn schließen.
- Entfernen Sie die rückseitigen Sicherungsschrauben des Trimmergehäuses (5) mit einem M8-Schlüssel.
- Zum einfachen Lösen des Scheibentellers auf der Motorwelle verwenden Sie bitte Kriechöl. Ein paar Tropfen auf das Gewinde der Befestigung genügen.
- Nach einer kurzen Einwirkzeit auf das Gewinde nehmen Sie den mitgelieferten M 13 Rohrschlüssel und stellen ihn am hinteren Ende der Motorachse fest.
- Mit dem ebenfalls mitgelieferten M 24 Steckschlüssel entfernen Sie die Schleifscheibe (1) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn. Achten Sie darauf, dass der Rohrschlüssel die Achswelle des Motors blockiert.