



WEGOLD



LEGIERUNGEN

KONSTRUKTIONSELEMENTE / ENDO

GERÄTE & INSTRUMENTE

PRESSKERAMIK

VERBLENDKERAMIK

VERBRAUCHSMATERIALIEN

SERVICE

SmartFluid+

Additiv für
Modellierfluids

Schichten wie ein Profi

Das Additiv SmartFluid+ macht die Konsistenz Ihrer Keramik cremiger (sämiger), sehr geschmeidig und verleiht den Materialien ein herausragendes Modellierverhalten.

Die Materialien halten die **Feuchtigkeit** über einen längeren Zeitraum und bleiben **länger modellierfähig**. Des Weiteren erhöht sich die **Standfestigkeit ihrer Schichtung** und erleichtert Ihnen damit die Schichtung feinsten Details. Die **Rissneigung wird minimiert**. Die Schichtung kann zügiger und präziser aufgebaut werden, das **spart Nacharbeit und Zeit**.

Perfekt geeignet zum Anmischen von

- Pulveropaker
- Dentin
- Schneide und
- Effektmassen

Die **Konsistenz** kann durch das Mischverhältnis vom Anwender **individuell eingestellt** werden.



Das unverzichtbare Helferlein

SmartFluid+ kann für die Wegold Keramiklinien replica, classica, cosmica, unica verwendet werden, ist aber nach unserem Wissensstand **für alle gängigen hoch- und mittelschmelzenden Keramiken verwendbar**. Bei niedrigschmelzenden Keramiken prüfen Sie bitte anhand einer Brennprobe mit Transpa clear, ob eine Eintrübung eintritt. Sollte dies der Fall sein, reduzieren Sie die Zugabemenge von SmartFluid+. Nur wenn die Eintrübung verschwindet, eignet sich SmartFluid+ für die Verwendung.

Schnelles und ergonomisches Arbeiten

Mit der Anmischplatte simpliwet® ist schnelles und ergonomisches Arbeiten garantiert: die Keramikmasse muss nicht mehr angemischt werden, denn **alle benötigten Massen werden vorgelegt**. Das Keramikpulver bleibt dank Filtermembranen über mehrere Tage verwendbar: Bei **längeren Arbeitspausen oder über Nacht** – einfach Deckel drauf und simpliwet® samt Keramikmasse in den Kühlschrank stellen.

So einfach geht es



1
Füllen Sie das Additiv SmartFluid+, bis zum Teilstrich der gewünschten Konzentration.



2
Anschließend füllen Sie die Flasche bis zur oberen Markierung mit dem Modellierfluid auf.

SmartFluid+ hält Ihre Keramik länger modellierfähig und erhöht die Standfestigkeit



Am besten schichten Sie auf unserer Anmischplatte simpliwet®



Um die Eigenschaften des Additivs kennenzulernen, beginnen Sie am besten mit einer Konzentration von 20%. Je höher die Konzentration des Additivs, desto cremiger wird sich die Keramik anfühlen.


Perfektes Schichten

Mit SmartFluid+ und der professionellen Anmischplatte simpliwet® schichten Sie wie ein Profi!

Wegold Bestell-Hotline:

+49 (91 29) 40 30-0

oder per E-Mail an info@wegold.de

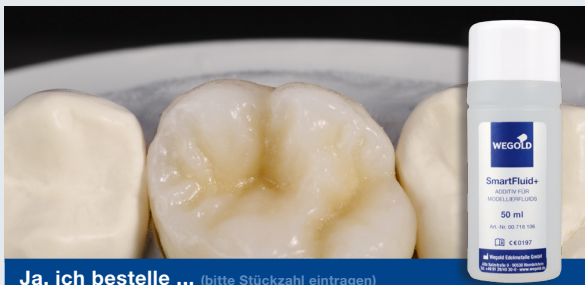

Ja, ich bestelle ... (bitte Stückzahl eintragen)

Stück	Artikel	Art.Nr.	Preis
	SmartFluid+ Additiv für Modellierfluids 50ml inkl. Mischfläschchen	00 718 106	46,50 €
	simpliwet® Set Anmischplatte für Profis inkl. Glasdeckel und Wabenplatte, 25x Filtermembrane und 25x Papierfilter	00 068 342	90,00 €

Firma:

Straße:

PLZ:

Ort:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Datum:

Stempel / Unterschrift:

Verblendkeramik von Wegold

Ein abgestimmtes Gesamtkonzept
für höchste Ästhetik und Qualität



Alle Infos unter www.wegold.de

Bestell-Hotline:
+49 (91 29) 40 30-0

 Wegold Edelmetalle GmbH

Nibelungenstr. 5
90530 Wendelstein

Telefon +49 (9129) 40 30-0
Telefax +49 (9129) 40 30-40

info@wegold.de
www.wegold.de



Produkte & Services
für die Dentalbranche