

Dauerhafte Befestigung auf höchstem Niveau: WegoCem SE

Mit WegoCem SE steht Ihnen jetzt ein neuer, dualhärtender Dentalkleber zur Verfügung, mit dem beim Verkleben von Zirkon oder Metallen der Einsatz teurer und zeltaufwändiger Haftvermittler (Primer) wegfällt.

Die wichtigsten Eigenschaften

- WegoCem SE Dentalkleber ist
- selbstadhäsiv (bei Zirkon und Metall keine Verwendung von Primer-Systemen notwendig)
 - dualhärtend (2-Komponenten-Kleber)
 - röntgenopak
 - mechanisch hoch belastbar

Einsatz und Verwendung

- WegoCem SE kann verwendet werden für:
- Permanente Befestigung von **Kronen und Brücken auf Implantat-Abutments** aus Titan oder Zirkonoxid.
 - Permanente Befestigung von **Galvanokappen und Restaurationen** aus Titan, PEEK oder CoCrMo an Tertiärstrukturen oder **Geschiebe- bzw. Teleskopelementen** aus Metall oder Methylacrylat.

Verkleben ohne Primer

- Oxidkeramiken (Zirkon / Aluminiumoxid), Metalle und Metalllegierungen können ohne Haftvermittler direkt auf Dentin verklebt werden. Die **Verarbeitung ist ganz einfach**
- mit Aluminiumoxid sandstrahlen
 - reinigen und trocknen
 - kleben!

Vorteile auf einen Blick

- **Material- und Lagerkostensparnis:** Primer-Systeme sind teuer und müssen gelagert werden
- **Weniger Fehler:** fallen Arbeitsschritte weg, können sie auch nicht falsch gemacht werden
- **Zitersparnis:** egal welches Material Sie verkleben, die Zahnschleifsubstanz muss nicht aufwendig vorhanden, werden

Verklebbare Materialien

Metall auf Dentin	✓	ohne Primer
Oxidkeramik Zirkon auf Dentin	✓	ohne Primer
Silikatkeramik auf Dentin	✓	nur Keramik ätzen / primen
Glaskeramik auf Dentin	✓	nur Keramik ätzen / primen
Komposit auf Dentin	✓	nur Komposit strahlen / ätzen / primen
PEEK auf Dentin	✓	nur PEEK strahlen / primen
PMMA auf Dentin	✓	nur PMMA strahlen / primen
Weitere Materialien wie Frädkronenelemente in Metallausläsungen, Zirkonkappen auf Titanabutments, Zirkon auf Zirkon, PEEK-Peekkon-Kappen auf Titan-Zirkon-Abutments, PMMA-Komposit auf Peekkon-gusste, CW,LOC Flex	✓	



Bitte kühl lagern (2 bis 8 °C)!

WegoCem SE steht für innovative Technik, Sicherheit und Ersparnis von Zeit und Geld bei der Verklebung.

Fragen & Antworten

WegoCem SE kann überall dort eingesetzt werden, wo eine Zementierung mit hoher Festigkeit gefordert ist - also z.B. beim Verkleben von Abutments.

Was bedeutet SE?

SELF ETCH - also selbst-ätzend; das bedeutet, dass der Kleber beim Befestigen von Metall oder Zirkon an Dentin ohne Primer verwendet werden kann. Somit wird eine Befestigung von Zahnersatz aus Metall oder Zirkon direkt am Zahn schnell und unkompliziert ermöglicht.

Kann der Kleber im Mund verwendet werden?

Ja, WegoCem SE ist ein zahnärztlicher Befestigungszement und für den oralen Einsatz zertifiziert.

Ist der Kleber dualhärtend?

Ja, WegoCem SE ist ein 2-Komponenten-Kleber. Die Mischung der beiden Bestandteile erfolgt in der praktischen Automix-Karüle.

Kann der Kleber mit Licht gehärtet werden?

Ja, WegoCem SE härtet bei einer Wellenlänge von 450 nm, wird aber auch ohne Licht fest.

Braucht man für das Verkleben von Metallen einen Primer?

Nein, WegoCem SE verklebt Metall ohne Primer.

Braucht man für das Verkleben von Zirkon einen Primer?

Nein, WegoCem SE verklebt Zirkon ohne Primer.

Kann man PEEK und PMMA verkleben?

Ja, das ist möglich, allerdings benötigt man hier einen dafür geeigneten Haftvermittler (Primer).

Welche Farbe hat der Kleber?

WegoCem SE entspricht ungefähr der Zahnfarbe A2.

Professionell & günstig

Mit WegoCem SE brauchen Sie beim Verkleben von Zirkon oder Metallen keinen Haftvermittler (Primer).

Wegold Bestell-Hotline:

+49 (91 29) 40 30-0

oder per E-Mail an info@wegold.de



Ja, ich bestelle ... (bitte Stückzahl eintragen)

Stück	Artikel	Art.Nr.	Preis
	WegoCem SE Kleber mit Automix-System 2x 4,5 Gramm je Komponente (Doppelkammerspritze) inklusive 10x Automix-Applikationskanülen	00 069 560	125,50 €
	Automix-Applikationskanülen • 10er-Pack passend für WegoCemSE und WegoFix Kleber	00 069 551	18,50 €
	Intraoraltip für Mischkanüle D kurz • 10er-Pack	00 069 553	12,50 €
	Mischkanüle D kurz für Intraoraltip • 10er-Pack	00 069 552	18,50 €

Firma:

Straße:

PLZ:

Ort:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Datum:

Stempel / Unterschrift:

Noch mehr Produkte zum Verbinden und Halten ...

... finden Sie in unserem umfassenden
Konstruktionselemente-Katalog



Gleich downloaden: www.wegold.de

Bestell-Hotline:
+49 (91 29) 40 30-0


Vertrieb durch
Wegold Edelmetalle GmbH

Nibelungenstr. 5
90530 Wendelstein

Telefon +49 (91 29) 40 30-0
Telefax +49 (91 29) 40 30-40

info@wegold.de
www.wegold.de



 **indigodental GmbH**
Fahltskamp 5
25421 Pinneberg, Germany

 **0482**

Produkte & Services
für die Dentalbranche