



Verarbeitungshinweis

Wegold Stumpfhärter & Wegold Isolierung

Der Wegold Stumpfhärter und die Wegold Isolierung eignen sich hervorragend um Gips gegen Keramik zu isolieren.

Die Kombination dieser beiden Flüssigkeiten erlaubt es, nach dem Schichten mit Keramik diese vollkommen rückstandslos und ohne Verformung vom Gips abzuheben.

Verarbeitung:

1. Um ein Anhaften der Keramikmasse zu verhindern, wird der Gips zunächst mit dem Stumpfhärter dünn eingepinselt. 1 Minute trocknen lassen.
2. Isolierung gleichmäßig auftragen und Überschüsse ggf. entfernen.
3. Nun kann die Keramikmasse aufgetragen werden.

Wegold Edelmetalle GmbH

Nibelungenstr. 5
90530 Wendelstein

Telefon +49 (9129) 4030-0
Telefax +49 (9129) 4030-40

info@wegold.de

www.wegold.de